

BRUKSANVISNING PERFUSOR ME ®

MEKANISK SMERTEPUMPE MED ELEKTRONISK OVERVÅKING

Fyll sprøyten med ønsket dose smertestillende, etterfyll om nødvendig NaCl. 0,9 % til volumet utgjør 10 ml.

2. Trekk opp pumpen med den store, blanke knappen (3). Trekk mot høyre, som en klokke. NB! Ikke overtrekk pumpen!
3. Legg sprøyten på plass i pumpen
NB! Det må ikke være luft i sprøyte eller slange.
4. Velg infusjonstid ved å regulere den sorte knappen (2) med en mynt e.l., slik at pilen peker på ønsket infusjonstid (6 – 12 – 24 timer).
5. Skyv utløserknappen (7) mot pilen og slipp den tilbake.
6. Start pumpen ved å slå på sort bryter (1) fra 0 – 1


Pumpen vil nå gi sprøytens 10 ml. på det antall timer den er programmert for. Bruk samme fremgangsmåte hver gang ny infusjon startes. Dersom pasienten trenger ekstra tilførsel av smertestillende (støtdose), benyttes følgende fremgangsmåte:

Slå av pumpen, (sort bryter (1) fra 1 – 0)

Skyv utløserknappen (7) mot pilen, og hold mens opptrekkknappen (3) vrir mot venstre til den ønskede dose er gitt. Skal luft i systemet fjernes, brukes samme fremgangsmåte som for støtdose.

KLB anbefaler ikke å gi støtdose fra pumpen. Se prosedyren

8. Alarmfunksjon (lydsignal):
Perfusor ME ® har innebygget et elektronisk overvåkingssystem. Systemet overvåker drivverkets funksjon og gir alarm ved hjelp av lydsignal dersom drivverket stanser.
Alarm utløses i følgende tilfeller:
 - Når pumpen startes (viser at batteri er i orden).
 - Sprøyten er tom.
 - For stor trykkmotstand (f.eks. ved klem på slangen).
 - Drivverket er deffekt.

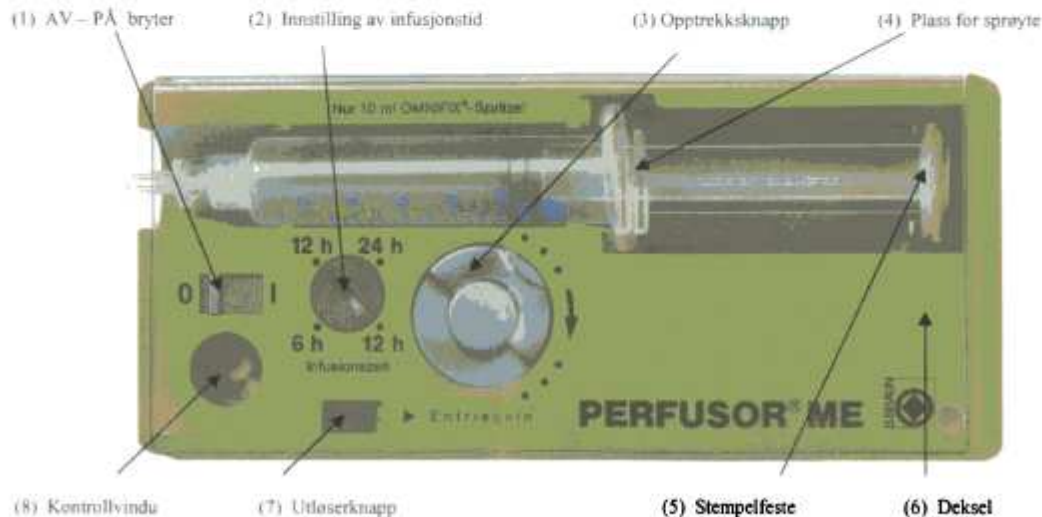

MERK!

Opptrekkknappen må aldri vrir mot pilens retning uten at utløserknappen holdes til høyre og pumpen er slått av.

Rengjøres med såpevann, evt. plasterfjerner. (NB! Ikke etsende rengj. midler som aceton o.l.)